



National Institute for
Occupational Safety and Health
NIOSH

El respirador REGULUS presenta un diseño de plegado vertical con bordes más flexibles que se adapta a las características faciales del usuario. Las mascarillas de plegado vertical se pliegan fácilmente cuando no se usan y se ajustan bien a gafas protectoras o cascos, lo que las hace prácticas para diversas situaciones laborales. Estos modelos han sido diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de aprobación de NIOSH en cuanto a resistencia respiratoria y eficiencia de filtración.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro interior excepcional para una menor resistencia respiratoria
- Clip nasal de plástico ajustable individualmente que permite al usuario personalizar el ajuste para un mejor sellado y ayuda a reducir el empañamiento de las gafas
- Correas para la cabeza soldadas por ultrasonidos para un sellado seguro
- Hebilla ajustable para el cuello para un ajuste perfecto
- Puente nasal de espuma de uretano de alta densidad para reducir las fugas y brindar comodidad al trabajador
- Válvula de exhalación opcional que reduce la acumulación de calor y humedad dentro de la mascarilla para mayor comodidad del trabajador durante largas jornadas de trabajo

NORMAS

Este producto ha sido probado y cumple con la norma NIOSH N95. Aprobado por NIOSH. Las principales pruebas de rendimiento de esta norma son:

- Penetración del filtro
 - Resistencia respiratoria
 - Fuga de la válvula de exhalación (si corresponde)
- Filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtrado del 95 %) eficaz contra aerosoles de partículas sin aceite; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.

MATERIALES

Los siguientes materiales se utilizan en los respiradores de partículas REGULUS:

	REGULUS MAK699+
Gancho para la oreja	•
Espuma nasal	•
Pinza para la nariz	•
Medios filtrantes	•
Válvula de exhalación	•
Membrana de la válvula	•
Carbón activado	•
Hebilla ajustable	•

*Los materiales no contienen látex y no contienen ningún látex de caucho natural.

APROBACIÓN

Se asigna un número TC único para cada modelo aprobado por NIOSH:


Modelo	Número de TC
MAK699+	84A-7841

CLASIFICACIÓN

Calificación	Eficiencia de filtrado			Observación
	95%	99%	99.97%	
N-Tipo	N95	N99	N100	No resistente al aceite
P-Tipo	P95	P99	P100	A prueba de aceite
R-Tipo	R95	R99	R100	Resistente al aceite

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Los respiradores de partículas de la serie N95 tienen una vida útil de 3 años. La fecha de caducidad está indicada en el envase del producto. Antes del primer uso, compruebe siempre que el producto se encuentre dentro de la fecha de caducidad indicada. El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco, a una temperatura de -5 °C a +50 °C, con una humedad relativa máxima de <75 %. Al almacenar o transportar este producto, utilice el embalaje original.

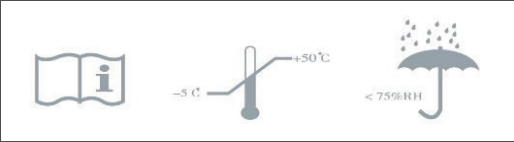

GARANTÍA

Esta garantía limitada sustituye las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que excedan la descripción del presente documento. Los productos vendidos cumplirán con los estándares y especificaciones físicas de Makrite.

LIMITACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO

No utilice el mismo respirador durante más de 8 horas, de forma continua o intermitente, en lugares de trabajo sucios que puedan sobrecargar el filtro.

Abandone el área contaminada y quítese el respirador si le resulta difícil respirar, si no se logra un ajuste adecuado o si el respirador está dañado, sucio o deformado. No vuelva a utilizar el mismo respirador una vez retirado. La vida útil máxima de este respirador es de cinco (5) días calendario consecutivos (incluidos los días sin uso), a partir del primer día de uso.

Advertencias

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y las limitaciones antes de usarlo.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Las personas con alta sensibilidad al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.
4. El usuario debe realizar una prueba de ajuste cuantitativa o cualitativa realizada por un evaluador de ajuste cualificado antes de usar el respirador en un entorno contaminado, según las directrices de la OSHA, 29 CFR 1910.134. Instrucciones de ajuste del respirador

ADVERTENCIAS

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y las limitaciones antes de usarlo.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Las personas con alta sensibilidad al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.
4. El usuario debe realizar una prueba de ajuste, ya sea cuantitativa o cualitativa, realizada por un evaluador de ajuste cualificado antes de usar el respirador en un entorno contaminado, según las directrices de la OSHA, 29 CFR 1910.134.

EMPAQUE

- Caja x 15 unidades
- Caja máster x 180 unidades



Descarga y comparte esta información

www.humanpack.com

INSTRUCCIONES DE AJUSTE DEL RESPIRADOR



Sostenga el respirador en su mano como se muestra, con la mano izquierda sosteniendo la correa izquierda y la mano derecha sosteniendo la correa derecha.



Coloque el respirador sobre la nariz, la boca y la barbilla. Tire de las correas izquierda y derecha de modo que la parte superior de la correa quede por encima de la oreja y la inferior por debajo.



Sujete el gancho fijo, que se encuentra en la correa derecha, y engánchelo a la correa izquierda en la parte posterior de la cabeza para un ajuste perfecto. Hay 3 ranuras para ganchos que puede elegir según el tamaño de su cabeza.



Para probar el ajuste: a) Coloque ambas manos sobre el respirador, procurando no alterar la posición, y b) inhale vigorosamente. Si hay fugas de aire por los bordes, vuelva a colocar las correas o ajuste la tensión para un mejor ajuste.