

RESPIRATORY  
PACKS



**IP**  
**HUMANPACK**  
SAFETY

**SIBELIUS**  
RESPIRADOR DESECHABLE N95  
CON VÁLVULA



National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**

El respirador SIBELIUS está diseñado para proteger a los trabajadores de la exposición a sustancias sólidas sin aceite. El modelo cónico de la mascarilla N95 es el más utilizado en todos los entornos laborales. Estos modelos han sido diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de aprobación de NIOSH en cuanto a resistencia respiratoria y eficiencia de filtración.

## CARACTERÍSTICAS

- Filtro interno excepcional para baja resistencia respiratoria
- Clip nasal de aluminio ajustable individualmente para un ajuste excelente
- Correas para la cabeza soldadas por ultrasonidos para un sellado seguro
- Válvula unidireccional opcional para facilitar la exhalación
- Puente nasal de espuma de uretano de alta densidad para una excelente condición física y comodidad del trabajador

# NORMAS

Este producto ha sido probado y cumple con la norma NIOSH N95. Aprobado por NIOSH. Las principales pruebas de rendimiento de esta norma son:

- Penetración del filtro
- Resistencia respiratoria

Filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtrado del 95 %) eficaz contra aerosoles de partículas sin aceite; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.

# MATERIALES

Los siguientes materiales se utilizan en los respiradores de partículas SIBELIUS:

|                        | SIBELIUS |
|------------------------|----------|
| Correas para la cabeza | ●        |
| Espuma nasal           | ●        |
| Pinza para la nariz    | ●        |
| Medios filtrantes      | ●        |
| Válvula de exhalación  | ●        |
| Membrana de la válvula | ●        |

**\* Los materiales no contienen látex y no contienen ningún látex de caucho natural.**

# APROBACIÓN

Se asigna un número TC único para cada modelo aprobado por NIOSH:


| Modelo    | Número de TC |
|-----------|--------------|
| 9500V-N95 | 84A-5460     |

## CLASIFICACIÓN

| Calificación | Eficiencia de filtrado |     |        | Observación             |
|--------------|------------------------|-----|--------|-------------------------|
|              | 95%                    | 99% | 99.97% |                         |
| N-Tipo       | N95                    | N99 | N100   | No resistente al aceite |
| P-Tipo       | P95                    | P99 | P100   | A prueba de aceite      |
| R-Tipo       | R95                    | R99 | R100   | Resistente al aceite    |

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Los respiradores de partículas de la serie N95 tienen una vida útil de 3 años. La fecha de caducidad está indicada en el envase del producto. Antes del primer uso, compruebe siempre que el producto se encuentre dentro de la fecha de caducidad indicada. El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco, a una temperatura de -5 °C a +50 °C, con una humedad relativa máxima de <75 %. Al almacenar o transportar este producto, utilice el embalaje original.

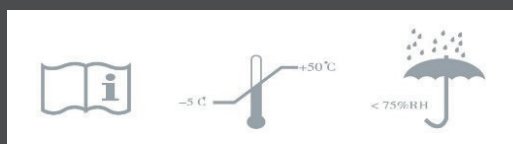

## GARANTÍA

Esta garantía limitada sustituye las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que excedan la descripción del presente documento. Los productos vendidos cumplirán con los estándares y especificaciones físicas de Makrite.

## LIMITACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO

No utilice el mismo respirador durante más de 8 horas, de forma continua o intermitente, en lugares de trabajo sucios que puedan sobrecargar el filtro.

Abandone el área contaminada y quítese el respirador si le resulta difícil respirar, si no se logra un ajuste adecuado o si el respirador está dañado, sucio o deformado. No vuelva a utilizar el mismo respirador una vez retirado. La vida útil máxima de este respirador es de cinco (5) días calendario consecutivos (incluidos los días sin uso), a partir del primer día de uso.

## Advertencias

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y las limitaciones antes de usarlo.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Las personas con alta sensibilidad al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.
4. El usuario debe realizar una prueba de ajuste cuantitativa o cualitativa realizada por un evaluador de ajuste cualificado antes de usar el respirador en un entorno contaminado, según las directrices de la OSHA, 29 CFR 1910.134. Instrucciones de ajuste del respirador

## ADVERTENCIAS

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y las limitaciones antes de usarlo.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Las personas con alta sensibilidad al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.
4. El usuario debe realizar una prueba de ajuste, ya sea cuantitativa o cualitativa, realizada por un evaluador de ajuste cualificado antes de usar el respirador en un entorno contaminado, según las directrices de la OSHA, 29 CFR 1910.134.

## EMPAQUE

- Caja x 10 unidades
- Caja máster x 180 unidades



Descarga y comparte esta información

[www.humanpack.com](http://www.humanpack.com)

## INSTRUCCIONES DE AJUSTE DEL RESPIRADOR



Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en la punta de los dedos, permitiendo que las bandas cuelguen libremente por debajo de su mano.



Presione el respirador firmemente contra su cara con la pieza nasal en el puente de su nariz.



Estirar y colocar la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y posicóñela debajo de tus orejas.



Usando ambas manos, moldee la pieza nasal a la forma de su nariz.



Para probar el ajuste: a) Coloque ambas manos sobre el respirador teniendo cuidado de no alterar la posición, y b) Exhalar vigorosamente. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes, vuelva a colocar las correas o ajuste la tensión de la correa para un mejor ajuste.

Siga cuidadosamente estas instrucciones de montaje durante cada uso para lograr un ajuste adecuado.